

VAXOL®

Ørespray / Öronspray /
Korvasuihke

FI

Vaxol® on yksinkertainen ja tehokas tuote, jonka avulla korvavaha pehmenee ja poistuu luonnollisesti. Tämä vähentää tarvetta korvahuuhteluihin ja helpottaa korvahuuhtelua, silloin kun sellainen on tehtävä. On kliinisesti todistettu, että oliiviöljy kosteuttaa kuivaa ihoa ja siten vähentää kutinaa ja ihoärsytystä.

Vaxolia® voivat käyttää aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset. Vaxolissa® on ainutlaatuinen annostelupumppu, jonka avulla on helppo annostella juuri oikea määrä tuotetta ulkokorvaan. Vaxolin® annostelu korvaan tapahtuu joko seisten tai istuen.

Lukekaa tämä pakkausseloste ennen käyttöä.

ENNEN KUIN ALOITAT VAXOLIN® KÄYTÖN

Lämmitä pulloa kämmenellä ja ravista hyvin. Paina pumpppua kolmesta neljään kertaan kunnes suihku toimii (katso kuva b). Muista osoittaa suutinin poispuolelta itsestäsi.

KÄYTTÖOHJEET

- Vaxol® toimii tehokkaimmin, kun pulloa on lämmitetty kämmenellä ja ravistettu hyvin ennen käyttöä.
- Estääksesi korvavahan muodostumista käytä Vaxolia® kerrasta kahteen viikossa tai hoitohenkilöltä saamaasi ohjeistuksen mukaan.
- Valmistautuessaasi korvahuuhteluun annostelee Vaxolia® 1–2 kertaa kahdesti päivässä 4–5 päivän ajan ennen korvahuuhtelua, tai hoitohenkilön ohjeen mukaan.
- Kuivan korvakäytävän kutinaa ja ihoärsytystä hoitaessasi annostelee Vaxolia® 1–2 kertaa viikossa, tai hoitohenkilön ohjeen mukaan.
- Vedä korvan yläosaa kevyesti ylös- ja taaksepäin (katso kuva a).
- Pida pulloa pystyasennossa ja aseta suuttimen pää korvakäytävään. Paina pumpppu pohjaan 1–2 kertaa (katso kuva b).


- Hiero kevyesti tragusta (korvalehden etuosassa oleva nipukka, katso kuva a).
- Toista käsittely tarvittaessa toiselle korvalle.
- Älä huuhdo korvaa käsittelyn jälkeen.
- Suuttimen kärki on hyvä irrottaa ja huuhdella kuumalla vedellä käytön jälkeen ja asettaa takaisin paikalleen.

LISÄTIETOJA

- Käytä Vaxolia® vain lääkärin valvonnassa, jos kärsit korvakivusta tai korvan tärykalvo on puhjennut.
- Vaxolia® ei saa käyttää alle vuoden ikäisten lasten korviin ilman lääkärin neuvoa.
- Oliiviöljy on laajalti käytetty luonnontuote. Tuotteen tai sen käyttämisen yhdessä lääkkeiden kanssa ei ole raportoitu aiheuttavan sivuvaikutuksia. Tuotetta ei pidä käyttää, jos olet yliherkkä oliiviöljylle.
- Jos tuote aiheuttaa allergiaoireita, tulee sen käyttö lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin välittömästi.
- Tuotteella ei ole tunnettuja haitallisia sivuvaikutuksia raskauden tai rintoarukinnan aikana käytettynä. Kerro tuotteen käytöstä kuitenkin lääkärille.
- Tuotteen yliannostelulla ei ole tunnettuja haitallisia sivuvaikutuksia.

VAROITUKSET

- Vaxol® -pullo on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Vaxol® tulee säilyttää pystyasennossa huoneenlämmössä.
- Tuote tulee käyttää kuuden kuukauden kuluessa avaamisesta.
- Tuotetta ei saa suihkuttaa avotuleen.
- Tuote on pidettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan korvakäytävään. Älä suihkuta tuotetta lähellä silmiä, nenää tai suuta.

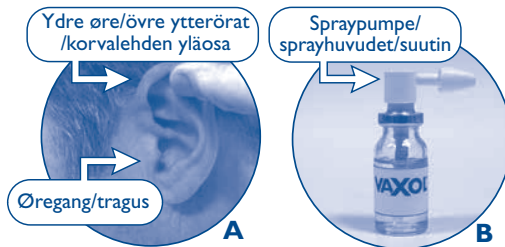

Vaxolin® valmistaa Iso-Britanniassa FW Medicalille
HL Healthcare Ltd, 112-114 Witton Street, Northwich, Cheshire CW9 5NW,
United Kingdom.

Vaxol® on FW Medicalin rekisteröimä tavaramerkki.

Tämä ohje on tarkastettu tammikuun 2015.

Vaxol® on eurooppalaisen direktiivin 93/42/CEE täyttävä luokkaan I
kuuluva lääketieteellinen tarvikke.

Ref.no. CA008534

www.vaxol.fi

VI 19-5 MP00870

10ml

